



INDICADOR DE TERMODESINFECÇÃO PARA LAVADORAS-DESINFETADORAS

– STC-W300 –



AUTO
ADESIVO

- AVALIA 82°C E 93°C
- FÁCIL ARQUIVAMENTO

SOBRE O PRODUTO

Conforme **ISO 15883-1:2020**.

Verifica a **efetividade da temperatura da fase termodesinfecção** em Lavadora-Desinfetadora.

Autoadesivo de **fácil arquivamento**.

Ótimo **Custo Benefício**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

| ITEM# | EMBALAGEM |
|----------|------------------------|
| STC-W300 | PACOTE COM 30 UNIDADES |



stericontrol.com •



sac@stericontrol.com

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **STC-W300** é um teste desenvolvido para verificar a **temperatura na superfície de instrumentais médicos em lavadoras termodesinfectoras**. Pode ser utilizado para testes de qualificação após a instalação do equipamento e reparos, bem como para testes de rotina para garantir o desempenho adequado do equipamento. Fornece evidências de que a **temperatura de desinfecção adequada foi atingida** durante a lavagem.

INSTRUÇÕES DE USO

1. **Prenda a etiqueta no instrumental** previamente limpo e seco (sem remover a etiqueta), pode ser preso com uma presilha ou em uma pinça.
2. Coloque-o dentro da **lavadora termodesinfectora e execute o ciclo** desejado.
3. Após o ciclo retire a carga da lavadora e **leia o resultado do STC-W300** – o indicador **mudará de branco para preto** quando a temperatura da superfície atingir a temperatura nominal.
4. **Remova a etiqueta** e registre o resultado do teste.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões: 4,3cm x 1,4cm

Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente (10 a 35°C) e 30 a 80% de umidade relativa do ar, após aberto mantenha o pacote com indicador STC-W300 fechado com Zip Lock.

Identificação: Lote e data de validade estão impressos no produto.

*Não use o indicador de limpeza após a data de validade.

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS

ISO 15883-1:2020

Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



INTERPRETAÇÃO

O **STC-W300** apresenta um indicador que muda de branco para preto conforme ISO 15883-1:2020. O usuário pode determinar:

COMO LER UM INDICADOR DE TEMPERATURA LAVADORA-DESINFETADORA
NÃO PROCESSADO

APROVADO

APROVADO

Se a janela indicadora de temperatura **mudar de branco para preto** o usuário pode determinar que **foram alcançadas** as condições ideais de temperatura na fase de termodesinfecção da Lavadora Termodesinfectora.

REPROVADO

Se a janela indicadora de temperatura **permanecer na cor branca** o usuário pode determinar que não foram alcançadas as condições ideais de temperatura na fase de termodesinfecção da Lavadora Termodesinfectora. Reprocesse o material, caso ocorra a falha novamente contate o serviço técnico do equipamento.

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.