



INDICADOR DE TEMPERATURA

PARA LAVADORAS TERMODESINFECTORAS
STC-W300

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#

STC-W300

EMBALAGEM

30 UNIDADES



STC

STERICONTROL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **STC-W300** é um teste desenvolvido para verificar a temperatura atingida na superfície de instrumentais médicos durante o processo realizado em lavadoras termodesinfectoras.

Pode ser utilizado em ensaios de qualificação após a instalação ou manutenção do equipamento, bem como em testes de rotina, garantindo o desempenho adequado do processo de termodesinfecção.

O teste fornece evidências de que a temperatura mínima necessária de desinfecção foi alcançada durante o ciclo de lavagem, contribuindo para a validação e segurança do processo.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Prenda a etiqueta no instrumental previamente limpo e seco, sem removê-la da base. A fixação pode ser feita com presilha, pinça ou outro dispositivo adequado que não obstrua a leitura.
2. Coloque o instrumental dentro da lavadora termodesinfectora e execute o ciclo desejado, conforme procedimento validado.
3. Ao término do ciclo, retire a carga da lavadora e verifique o resultado do STC-W300: o indicador mudará de branco para preto quando a temperatura da superfície atingir a temperatura nominal especificada.
4. Remova a etiqueta e registre o resultado do teste conforme o POP da instituição, mantendo rastreabilidade.

INDICAÇÕES DE USO

Produto exclusivo para Lavadoras Termodesinfectoras em ciclos com fase de termodesinfecção.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Se tiver alguma dúvida sobre a mudança de cor do indicador, os materiais não devem ser considerados desinfetados.
2. Não utilize qualquer tira do indicador que não esteja com o indicador químico na cor branca antes da exposição ao ciclo de termodesinfecção.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Processo: Termodesinfectora

Dimensões: 43 mm x 14 mm

Embalagem: 30 unidades/pacote

Material: Substrato: Alumínio

Estado da matéria: Sólido

Mudança de cor: Cor Inicial: Branco | Cor Final: Preto

ARMAZENAMENTO

Temperatura: 10°C a 35°C (Proteger de fontes de calor)

Umidade Relativa: 30 a 80%

Data de validade: 24 meses após a fabricação

ATENÇÃO: Após aberto mantenha o pacote fechado com o zip lock.

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS

ISO 11140-1:2014

ISENÇÕES

Isento de chumbo e metais pesados tóxicos.

DESCARTE

Descartar como lixo comum.



INTERPRETAÇÃO

O STC-W300 apresenta um indicador que muda de branco para preto conforme ISO 15883-1:2020. O usuário pode determinar:

NÃO PROCESSADO



APROVADO



Se a janela indicadora de temperatura mudar de branco para preto o usuário pode determinar que foram alcançadas as condições ideais de temperatura na fase de termodesinfecção da Lavadora Termodesinfectora.

REPROVADO



Se a janela indicadora de temperatura permanecer na cor branca o usuário pode determinar que não foram alcançadas as condições ideais de temperatura na fase de termodesinfecção da Lavadora Termodesinfectora. Reprocesse o material, caso ocorra a falha novamente contate o serviço técnico do equipamento.