

INDICADOR DE **LIMPEZA**

PARA LAVADORAS TERMODESINFECTORAS
STC-W100

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS	
ITEM#	EMBALAGEM
STC-W100	50 UNIDADES



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O indicador de limpeza **STC-W100** foi desenvolvido para avaliar a eficácia dos parâmetros de fluxo de água, tempo, temperatura e concentração de detergente durante o ciclo de limpeza e termodesinfecção em lavadoras termodesinfectoras hospitalares. O dispositivo é composto por uma lâmina metálica de alumínio, que simula a superfície de instrumentais cirúrgicos, recoberta por um test soil de cor rosa à base de proteínas, representando sangue e resíduos orgânicos.

A remoção completa do test soil após o ciclo indica que o processo de limpeza foi eficaz.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Utilize luvas antes do manuseio.
2. Insira o STC-W100 no suporte STC-W102, certificando-se de que o test soil fique exposto na janela.
3. O conjunto (STC-W100 + STC-W102) simula um instrumental cirúrgico contaminado.
4. Posicione o conjunto nos pontos de maior desafio da lavadora termodesinfectora com a janela do suporte STC-W102 voltada para a parte interna do cesto.
5. Execute o ciclo de limpeza conforme o procedimento validado pela instituição.
6. Ao término, remova a lâmina e avalie o resultado:
 - Aprovado: área rosa completamente removida.
 - Reprovado: presença de resíduos rosa.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não manuseie com as mãos desprotegidas.
2. Utilize luvas, máscara cirúrgica e mantenha as boas práticas de higiene.
3. Evite atrito direto sobre a superfície indicadora.
4. Produto não estéril e de uso único

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Processo: Lavadora termodesinfectora

Dimensões: 80 mm x 26 mm

Embalagem: 50 unidades/pacote

Material do Substrato: Alumínio

Test Soil: Tinta à base de proteínas

Estado da matéria: Sólido

Mudança de cor: Cor Inicial: Rosa | Cor Final: N/A (remoção completa indica eficácia)

Tipo de Embalagem: Metalizada Zip (120 x 195 mm)

Itens Inclusos: 50 indicadores de limpeza STC-W100, 1 bula, etiquetas de lote e identificação externa

Suporte Compatível: STC-W102

ARMAZENAMENTO

Temperatura: 10°C a 35°C (Proteger de fontes de calor)

Umidade Relativa: 10 a 70%

Data de validade: 24 meses após a fabricação

ATENÇÃO: Após aberto mantenha o pacote fechado com o zip lock.

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS

ISO 15883-5:2021

ISENÇÕES

Isento de chumbo e metais pesados tóxicos.

DESCARTE


Descartar como lixo comum, conforme as normas locais de biossegurança



INTERPRETAÇÃO

O STC-W100 apresenta um indicador test soil que simula sangue & tecidos orgânicos conforme ISO 15883-5. O usuário pode determinar:

NÃO PROCESSADO

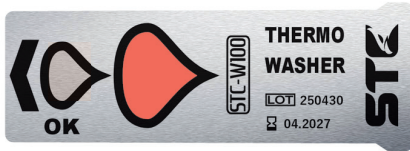

APROVADO



Se o test soil for removido do indicador o usuário pode determinar que foram alcançadas as condições ideais de limpeza da Lavadora Termodesinfectora (efetividade dos jatos de água, tempo de lavagem, temperatura e concentração do detergente utilizado).

Caso permaneça uma imagem residual incolor pode-se considerar o teste aprovado.

REPROVADO



Se o test soil não apresentar a remoção completa da área do indicador, o usuário pode determinar que as condições de limpeza não foram alcançadas. Uma possível falha mecânica, tempo de lavagem, temperatura e concentração de detergente devem ser verificadas. Reprocesse o material, caso ocorra a falha novamente contate o serviço técnico do equipamento.